



## ISTRUZIONI ANALISI CANI

### Istruzioni per prelievo nei cani

PER LE ANALISI O IL DEPOSITO DEL DNA NEL CANE E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'INSERIMENTO DEI DATI TRAMITE IL MODULO ON LINE E STAMPARNE UNA COPIA DA ALLEGARE AL MATERIALE

- **Prelievo di sangue:**  
2 ml di sangue in provette contenenti EDTA.  
Temperatura di conservazione dei campioni: +5 C° / +8C° (in frigorifero).

oppure

- **VetKard:**  
Si consiglia di effettuare il prelievo in prossimità del labbro superiore.  
Depositare la goccia di sangue sulla parte cerchiata in nero, lasciare asciugare per circa 30 minuti.  
Il prelievo di sangue deve essere (almeno) della dimensione di circa 4 mm.

In entrambi i casi il campione può essere spedito tramite corriere o con posta prioritaria ([non si effettua il ritiro dei campioni consegnati direttamente al laboratorio](#)).

Si consiglia di effettuare il prelievo e quindi la spedizione nei primi giorni della settimana, in modo da garantirne l'arrivo al laboratorio entro il venerdì.

Se il campione non può essere spedito il giorno del prelievo se ne consiglia la conservazione in frigorifero (+ 5 / +7°C) per non più di 2 giorni.

#### DOCUMENTI DA ALLEGARE al contenitore dei campioni:

Modulo identificativo del cane (stampa del modulo on-line precedentemente compilato)  
Fotocopia del Bollettino di Conto Corrente Postale (**NO vaglia postali, NO contanti**)  
Fotocopia Lettera ENCI (se in possesso)

**Il modulo on-line deve essere compilato, stampato, timbrato e firmato dal veterinario**

## Istruzioni per prelievo nei cani con Vet Kard

PER LE ANALISI O IL DEPOSITO DEL DNA NEL CANE E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'INSERIMENTO DEI DATI TRAMITE IL MODULO ON LINE E STAMPARNE UNA COPIA DA ALLEGARE AL MATERIALE

### VetKard:

- Si consiglia di effettuare il prelievo in prossimità del labbro superiore.
- Depositare la goccia di sangue sulla parte cerchiata in nero, lasciare asciugare per circa 30 minuti.
- Il prelievo di sangue deve essere (almeno) della dimensione di circa 4 mm.

Il campione può essere spedito tramite corriere o con posta prioritaria (non si effettua il ritiro dei campioni consegnati direttamente al laboratorio).

Si consiglia di effettuare il prelievo e quindi la spedizione nei primi giorni della settimana, in modo da garantirne l'arrivo al laboratorio entro il venerdì.

Se il campione non può essere spedito il giorno del prelievo se ne consiglia la conservazione in frigorifero (+ 5 / +7°C) per non più di 2 giorni.

### DOCUMENTI DA ALLEGARE al contenitore dei campioni:

- Modulo identificativo del cane (stampa del modulo on-line precedentemente compilato)
- Fotocopia del Bollettino di Conto Corrente Postale (NO vaglia postali, NO contanti)
- Fotocopia Lettera ENCI (se in possesso)


**Il modulo on-line deve essere compilato, stampato, timbrato e firmato dal veterinario**

## VET KARD SYSTEM

Il Vet Kard System è un sistema per la raccolta, conservazione e estrazione di DNA da campione biologico, fornito da Prion Diagnostica per tutti gli operatori che desiderano effettuare analisi di identificazione genetica e test di parentela per cani.

### Caratteristiche della Vet Kard

- **Facile modalità di prelievo:** basta praticare una **piccola puntura sull'interno del labbro** dell'animale con l'apposita lancetta non invasiva e appoggiare l'area circolata della Vet Kard sulla goccia di sangue.
  - **Corretta identificazione dell'animale:** è sufficiente apporre nello spazio esterno della Vet Kard l'identificativo anagrafico del soggetto (nome, razza, n° ROI, etc) e la data del prelievo.
- Conservazione e trasporto a temperatura ambiente:** i campioni su Vet Kard non necessitano di refrigerazione.

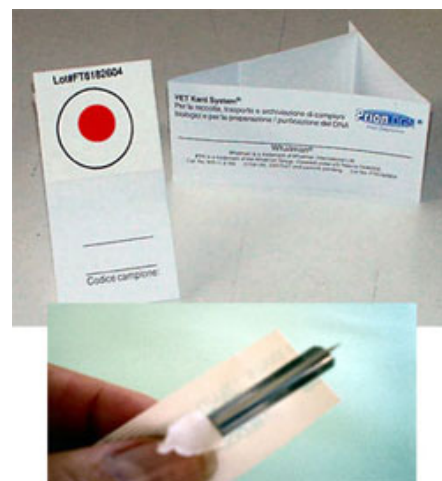

**Invio a mezzo posta:** la Vet Kard (opportunamente inserita nel sacchetto provvisto di essiccatura in dotazione con il Kit) viene inviato ai laboratori convenzionati ENCI che effettuano l'analisi del DNA, per l'esecuzione di test di paternità sui cani iscritti al Registro Riproduttori Selezionati.

## Spedizione dei campioni

### INTESTAZIONE PACCO DI SPEDIZIONE:

**TRAMITE CORRIERE:** ( la spedizione è a carico del mittente)

Dipartimento di Scienze Animali  
Sezione di Zootecnica Veterinaria  
Vetogene Lab.  
via Ponzio, 7 - 20133 Milano  
**Att.ne Dr. Michele Polli**

**TRAMITE POSTA:** ( la spedizione è a carico del mittente)

Dipartimento di Scienze Animali  
Sezione di Zootecnica Veterinaria  
Vetogene Lab.  
via Celoria, 10 - 20133 Milano  
**Att.ne Dr. Michele Polli**

**TRAMITE CORRIERE CONVENZIONATO :** ( la spedizione è a carico del mittente)

Per spedire al nostro laboratorio l'allevatore/proprietario, oltre alle modalità standard, può avvalersi del corriere convenzionato GLS-Executive indicando sulla lettera di vettura la dicitura **PORTO ASSEGNATO**.

Il **costo** della spedizione con ns. corriere convenzionato, da pagare contestualmente al deposito/analisi di parentela (tramite il sito Vetogene direttamente tramite il "modulo analisi") è di :

- € 8,00 IVA inclusa da tutta Italia

- € 11,00 IVA inclusa da Sardegna e Sicilia

Per trovare la sede del corriere GLS-Executive più vicina e prenotare il ritiro consultate la pagina

<http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp> e compilate lo spazio relativo alla località.

L'indirizzo a cui spedire il campione è il seguente:

**VETOGENE SPIN OFF UNIVERSITA' DI MILANO**

**Att.ne Dr. Michele Polli**

Dipartimento di Scienze Animali - Sezione di Zootecnica Veterinaria

Vetogene Lab.

via Ponzio, 7

20133 Milano

### Procedura per inviare il campione tramite corriere convenzionato GLS da tutta Italia a Vetogene

- 1) predisporre l'inserimento dei dati del campione (cane o gatto che sia) utilizzando l'apposito modulo sul sito Vetogene.it
- 2) stampare il modulo facendolo firmare e timbrare anche al Veterinario che farà il prelievo
- 3) Inserire nella busta il campione, il modulo dei dati inseriti, copia del pagamento effettuato, secondo le varie possibilità previste
- 4) chiamare il corriere GLS tramite il numero telefonico che vi comparirà a seconda della sede più vicina a voi (<http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp>) per organizzare e prenotare il ritiro.
- 5) compilare la scheda di vettura e inserire il pacchetto in una busta apposita in plastica che vi fornirà il vettore
- 6) ricordarsi di compilare l'indirizzo corretto e la dicitura **PORTO ASSEGNATO CODICE 1118** sulla lettera di vettura che vi fornirà il vettore.

**Tramite questa procedura potrete evitare di recarvi in Posta per la spedizione, ricordandovi che il pagamento del trasporto non va effettuato in contanti al corriere, in quanto già incluso nel vostro pagamento a Vetogene.**

## Tariffe analisi Cani

### TARIFE PER ANALISI DEL Cane

DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO	€ 15,00
PARENTELA	€ 50,00*
PROFILO GENETICO*	€ 50,00*
EPIDERMOLISI BOLLOSA(JEB)	€ 45,00*
CISTINURIA (Terranova)	€ 45,00*
CARIOTIPO	€ 100,00*
MDR1	€ 50,00*
SOD1	€ 50,00*

Se esiste una convenzione con VETOGENE s.r.l. i prezzi applicati sono i seguenti:

DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO	€ 12,00
PROFILO GENETICO*	€ 45,00*
PARENTELA	€ 45,00*
EPIDERMOLISI BOLLOSA(JEB)	€ 42,00*
CISTINURIA (Terranova)	€ 42,00*
MDR1	€ 45,00*
SOD1	€ 45,00*

\* Il prezzo del PROFILO GENETICO è comprensivo di esame DNA più deposito campione biologico.

Prezzi per singolo soggetto.

Nota : i costi sono comprensivi di IVA

**Si ricorda** che potranno usufruire degli sconti convenzione **solo** coloro che accluseranno alla documentazione la fotocopia della tessera di iscrizione ad una delle associazioni convenzionate ([vedi](#))

## Modalità di pagamento cani

Le prestazioni effettuate da Vetogene srl possono essere pagate in queste modalità :

### CARTA DI CREDITO



E' attivo il servizio di pagamento tramite le principali carte di credito e Postepay, al fine di poter effettuare direttamente on line i pagamenti relativi ai nostri servizi.

Nei moduli di richiesta analisi troverete la scelta del tipo di pagamento e nel caso in cui selezionate " paga con carta di credito, vi si aprirà la pagina relativa al pagamento che dovrete eseguire, con le relative istruzioni.

**Attenzione :** Il pagamento con Carta di credito **non è abilitato** per i clienti che richiedono analisi in convenzione

---

### BOLLETTINO POSTALE **CONTO CORRENTE POSTALE N° 67808832**

**Intestato a :** VETOGENE s.r.l.

**Causale :** Analisi genetica n° .....

Cani di razza .....

Nome e Cognome,

Indirizzo

Codice Fiscale del proprietario (o della persona cui va intestata la fattura, se differente).

**In caso di Società** indicare Partita IVA

---

### BONIFICO BANCARIO **IBAN: IT 46 F 07601 01600 000067808832**

**Intestato a :** VETOGENE s.r.l.

**Causale :** Analisi genetica n° .....

Cani di razza .....

Nome e Cognome,

Indirizzo

Codice Fiscale del proprietario che è stato inserito nel modulo compilato on line

**In caso di dimenticanza di tali dati, non saremo in grado di ottenere informazioni sull'avvenuto pagamento.**

**Attenzione :** UNA COPIA DEL BONIFICO VA INSERITA CON IL CAMPIONE CHE CI SPEDITE

Vetogene srl è a vostra disposizione per qualsiasi informazione, potete contattarci via e-mail [info@vetogene.com](mailto:info@vetogene.com) o telefonando al 3274784676 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12