




ISTRUZIONI ANALISI GATTI

Istruzioni per prelievo nei gatti

- **Prelievo di sangue:**
0,3 - 0,5 ml di sangue in provette contenenti EDTA.

Oppure prelievo buccale, da effettuarsi con:

- **"Spazzolino Cytobrush":**

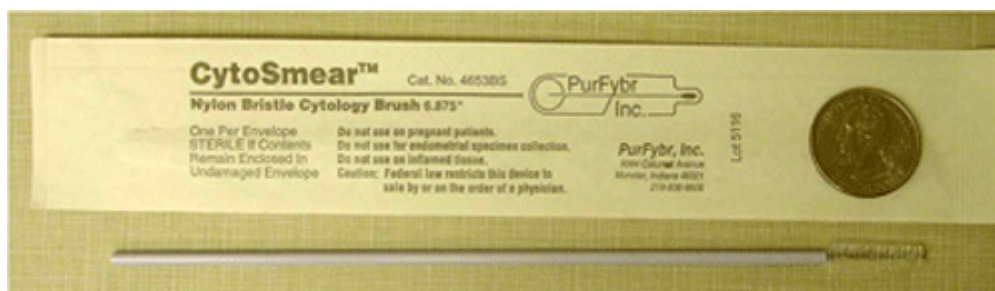

Monouso per prelievo citologico endocervicale, per spazzolatura della parete interna della guancia e raccolta delle cellule di sfaldamento della mucosa buccale.


Ciascun spazzolino va sfregato con una certa energia tra la gengiva superiore e la guancia, internamente, 3-4 volte a destra e 3-4 volte a sinistra.

L'operazione non arreca dolore al gatto né sanguinamento (se la mucosa non è già infiammata).

Un prelievo mal fatto può inficiare l'esito del test.

Per ciascun campione sono necessari **due spazzolini**.

Lo spazzolino va **lasciato asciugare** a temperatura ambiente per 15' prima di imbustarlo.

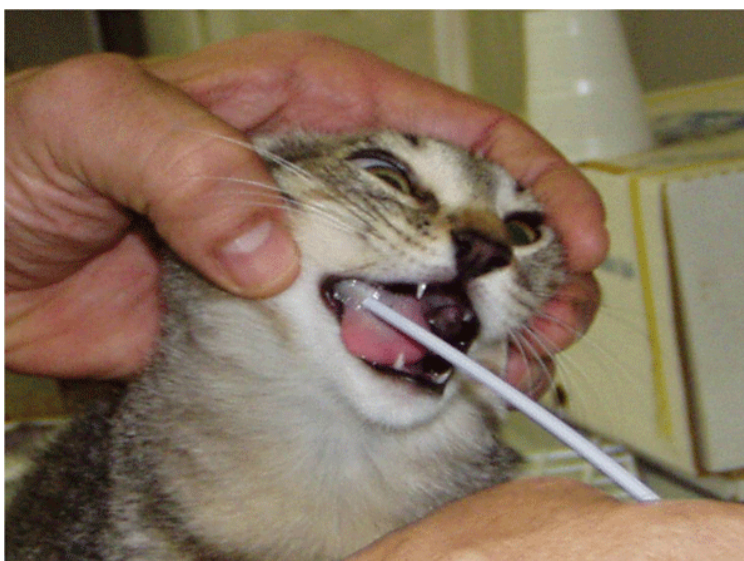

Segue Istruzioni per prelievo nei gatti

Cotton Fioc:

Vanno mantenuti gli stessi accorgimenti indicati per il buccal swab, in questo caso però sarà necessario fornire almeno **5 cotton fioc**, utilizzati da un solo lato (asportare il cotone ad una estremità ed utilizzare l'altra per il prelievo).

Il cotton fioc andrà sempre **lasciato asciugare** all'aria prima di essere imbustato.

ATTENZIONE!

Se il prelievo viene effettuato con Cytobrush o Cotton Fioc **non toccare mai con le mani nude** la parte che viene inserita nella bocca del gatto, né prima né dopo il prelievo.

In caso di utilizzo di Cytobrush o Cotton Fioc se il campione non fosse ben prelevato e quindi insufficiente, verrà richiesto direttamente il sangue intero per la seconda analisi. In caso di prelievo maleseguito e quindi di materiale insufficiente per l'analisi, non avverrà il rimborso del pagamento effettuato.

In entrambi i casi il campione può essere **spedito tramite corriere o con posta prioritaria (non si effettua il ritiro dei campioni consegnati direttamente al laboratorio)**, senza refrigerazione e resiste a temperatura ambiente per 2-3 giorni.

Si consiglia di effettuare il prelievo e quindi la spedizione nei primi giorni della settimana, in modo da garantirne l'arrivo al laboratorio entro il venerdì. Se il campione non può essere spedito il giorno del prelievo se ne consiglia la conservazione in frigorifero (+ 5 / +7°C) per non più di 2 giorni

DOCUMENTI DA ALLEGARE al contenitore dei campioni:

Modulo identificativo del gatto

Copia originale del Bollettino di Conto Corrente Postale (NO vaglia postali, NO contanti)

Fotocopia bonifico bancario

Spedizione dei campioni

INTESTAZIONE PACCO DI SPEDIZIONE:



TRAMITE CORRIERE: (la spedizione è a carico del mittente)

Dipartimento di Scienze Animali
Sezione di Zootecnica Veterinaria
Vetogene Lab.
via Ponzio, 7 - 20133 Milano

Att.ne Dr.ssa Maria Longeri



TRAMITE POSTA: (la spedizione è a carico del mittente)

Dipartimento di Scienze Animali
Sezione di Zootecnica Veterinaria
Vetogene Lab.
via Celoria, 10 - 20133 Milano

Att.ne Dr.ssa Maria Longeri

segue [Spedizione dei campioni](#)

TRAMITE CORRIERE CONVENZIONATO : (la spedizione è a carico del mittente)

Per spedire al nostro laboratorio l'allevatore/proprietario, oltre alle modalità standard, può avvalersi del corriere convenzionato GLS-Executive indicando sulla lettera di vettura la dicitura PORTO ASSEGNATO.

Il costo della spedizione con ns. corriere convenzionato, da pagare contestualmente al deposito/analisi di parentela (tramite il sito Vetogene direttamente tramite il "modulo analisi") è di :

- € 8,00 IVA inclusa da tutta Italia

- € 11,00 IVA inclusa da Sardegna e Sicilia

Per trovare la sede del corriere GLS-Executive più vicina e prenotare il ritiro consultate la pagina <http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp> e compilate lo spazio relativo alla località.

L'indirizzo a cui spedire il campione è il seguente:

VETOGENE SPIN OFF UNIVERSITA' DI MILANO

Att.ne Dr. Michele Polli

Dipartimento di Scienze Animali - Sezione di Zootecnica Veterinaria

Vetogene Lab.

via Ponzio, 7

20133 Milano

**Procedura per inviare il campione tramite
corriere convenzionato GLS da tutta Italia a Vetogene**

- 1) predisporre l'inserimento dei dati del campione (cane o gatto che sia) utilizzando l'apposito modulo sul sito Vetogene.it
- 2) stampare il modulo facendolo firmare e timbrare anche al Veterinario che farà il prelievo
- 3) Inserire nella busta il campione, il modulo dei dati inseriti, copia del pagamento effettuato, secondo le varie possibilità previste
- 4) chiamare il corriere GLS tramite il numero telefonico che vi comparirà a seconda della sede più vicina a voi (<http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp>) per organizzare e prenotare il ritiro.
- 5) compilare la scheda di vettura e inserire il pacchetto in una busta apposita in plastica che vi fornirà il vettore
- 6) ricordarsi di compilare l'indirizzo corretto e la dicitura PORTO ASSEGNATO CODICE 1118 sulla lettera di vettura che vi fornirà il vettore.

Tramite questa procedura potrete evitare di recarvi in Posta per la spedizione, ricordandovi che il pagamento del trasporto non va effettuato in contanti al corriere, in quanto già incluso nel vostro pagamento a Vetogene.

Tariffe analisi Gatti

TARIFE PER ANALISI DEL DNA NEL GATTO

PATOLOGIE EREDITARIE	
DEPOSITO DNA	€ 15,00
PROFILO GENETICO	€ 50,00*
PARENTELA	€ 50,00*
PKD	€ 40,00*
GRUPPO SANGUIGNO	€ 45,00*
HCM	€ 40,00*
SMA	€ 40,00*
CONVENZIONE ABISSINI	Gratuito
GSD IV - GLICOGENOSI IV	€ 40,00*
PK DEFICIENCY	€ 45,00*
PK DEFICIENCY + PRA (2 test a gatto) (solo per Abissino e Somalo)	€ 70,00*
CARIOTIPO	€ 100,00*
COLORI	
DILUIZIONE dei MANTELLI	€ 40,00*
AGOUTI	€ 45,00*
AMBRA (Norvegese delle foreste)	€ 45,00*
GUANTI del sacro di Birmania	€ 40,00*
PELO LUNGO	€ 40,00*

* Il prezzo dell'Analisi del DNA è comprensivo di esame DNA più deposito campione biologico e sono comprensivi dell'emissione e spedizione dei certificati.

Prezzi per singolo soggetto.

TARIFE PER ADERENTI OSSERVATORIO HCM

MAINE COON	HCM mutazione Meurs Maine Coon	€ 25,00*
RAGDOLL	HCM mutazione Meurs Ragdoll	€ 25,00*
ALTRE	DEPOSITO DNA > 10 ANNI	Gratis

* Il prezzo dell'Analisi del DNA è comprensivo di esame DNA più deposito campione biologico e sono comprensivi dell'emissione e spedizione dei certificati.
Prezzi per singolo soggetto.

Nota : i costi sono comprensivi di IVA

Modalità di pagamento gatti

Le prestazioni effettuate da Vetogene srl possono essere pagate in queste modalità :



CARTA DI CREDITO



E' attivo il servizio di pagamento tramite le principali carte di credito e Postepay, al fine di poter effettuare direttamente on line i pagamenti relativi ai nostri servizi.

Nei moduli di richiesta analisi troverete la scelta del tipo di pagamento e nel caso in cui selezionate " paga con carta di credito, vi si aprirà la pagina relativa al pagamento che dovrete eseguire, con le relative istruzioni.

Attenzione : Il pagamento con Carta di credito **non è abilitato** per i clienti che richiedono analisi in convenzione



BOLLETTINO POSTALE CONTO CORRENTE POSTALE N° 67808832

Intestato a : VETOGENE s.r.l.

Causale : Analisi genetica n°

Gatti di razza

Nome e Cognome,

Indirizzo

Codice Fiscale del proprietario (o della persona cui va intestata la fattura, se differente).

In caso di Società indicare Partita IVA



BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 46 F 07601 01600 000067808832

Intestato a : VETOGENE s.r.l.

Causale : Analisi genetica n°

Gatti di razza

Nome e Cognome,

Indirizzo

Codice Fiscale del proprietario che è stato inserito nel modulo compilato on line

In caso di dimenticanza di tali dati, non saremo in grado di ottenere informazioni sull'avvenuto pagamento.

Attenzione : UNA COPIA DEL BONIFICO VA INSERITA CON IL CAMPIONE CHE CI SPEDITE

Vetogene srl è a vostra disposizione per qualsiasi informazione, potete contattarci via e-mail info@vetogene.com o telefonando al 3274784676 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12